

# GUIA DE DESINFECÇÃO DO BRONCOSCÓPIO


Broncoveoscópios EXERA (160), OPTERA (170), EXERA II (180) e EXERA III (190)

Consulte o GUIA DE LIMPEZA DO BRONCOSCÓPIO complementar para informações de limpeza

**AVISO:** Este guia é apenas um resumo das etapas necessárias para desinfetar corretamente seu broncoscópico. Certifique-se de seguir as etapas detalhadas descritas no MANUAL DE REPROCESSAMENTO DO ENDOSCÓPIO incluído na compra do seu broncoscópico.


## DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL

**1** Adaptador de limpeza por sucção (MAJ-222)

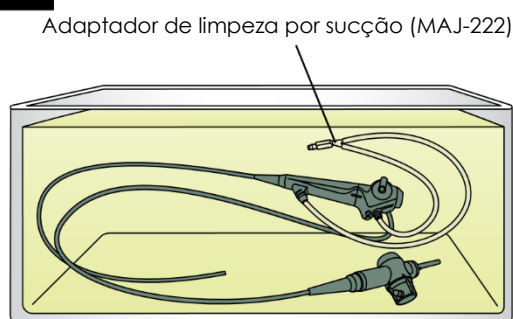


Encha a bacia com desinfetante. Conecte o adaptador de limpeza por sucção (MAJ-222) ao broncoscópico previamente limpo. Mergulhe completamente na solução desinfetante.

**2**

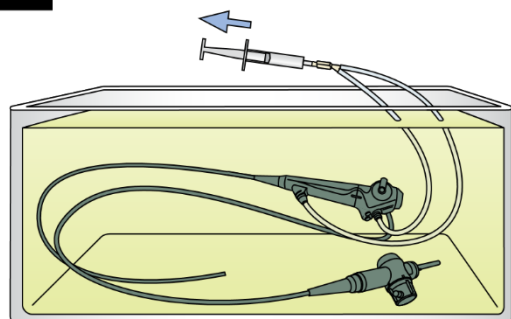


Conecte uma seringa ao adaptador. Puxe o êmbolo da seringa para encher os canais do instrumento/sucção e adaptador de limpeza do canal por sucção com solução de desinfetante.

**3**

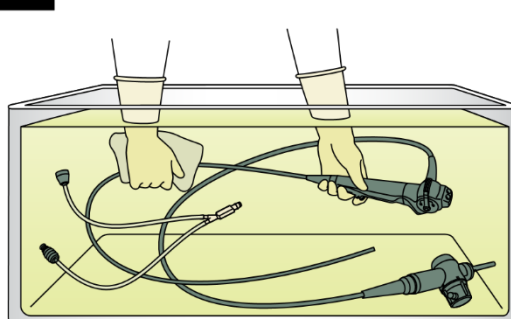


Enquanto imerso, desconecte o adaptador do broncoscópico. Use um pano limpo e sem fiapos para limpar as bolhas grudadas às superfícies externas.

**4**

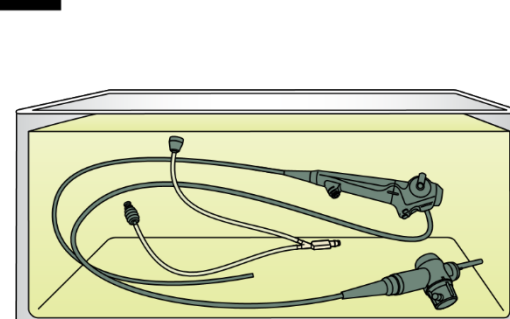


Deixe o equipamento e os acessórios mergulhados na solução desinfetante de acordo com as instruções do fabricante do desinfetante. Use um temporizador para medir o tempo exato do contato.

**5**

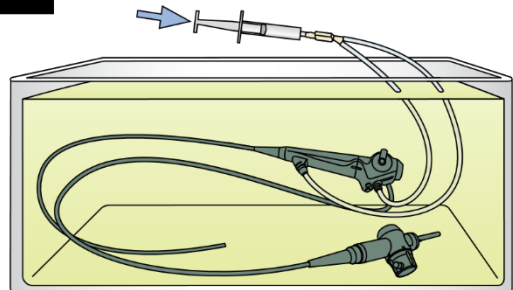


Conecte o adaptador de limpeza por sucção e a seringa. Injete 90ml de ar para remover o desinfetante dos canais do instrumento/sucção, em seguida, remova o broncoscópico do desinfetante.

**6**

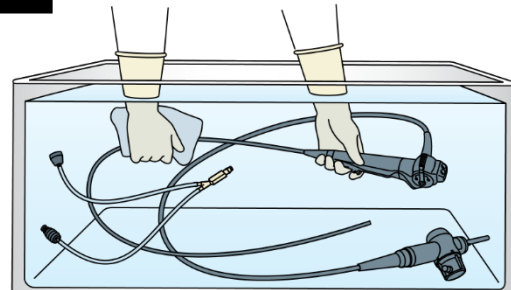


Desconecte o adaptador de limpeza por sucção e mergulhe o broncoscópico e o adaptador na água. Usando um pano estéril e sem fiapos, enxágue e limpe completamente todas as superfícies.

**7**

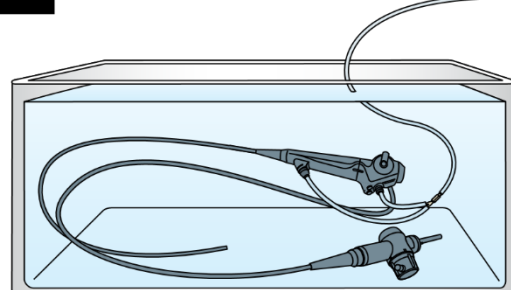


Conecte o adaptador de limpeza por sucção ao broncoscópico e a uma bomba de sucção. Aspire a água pelos canais por 30 segundos. Retire da água e aspire o ar pelos canais por 60 segundos.

**8**

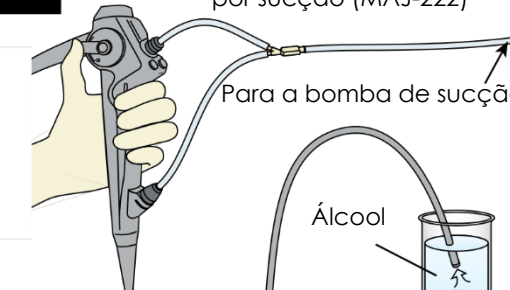


Mergulhe a extremidade distal do broncoscópico em álcool 70% e aspire o álcool por 5 segundos. Retire a extremidade distal do álcool e aspire o ar por 20 segundos.

## SECAGEM

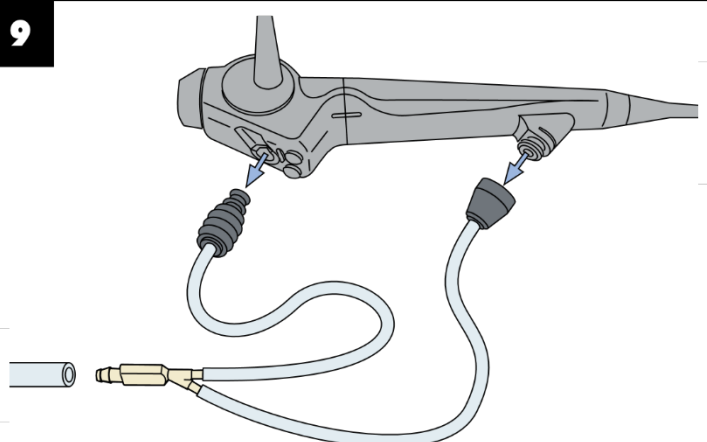


Desligue a bomba de sucção. Segure a seção de controle com as aberturas apontando para baixo e desconecte o adaptador de limpeza por sucção.

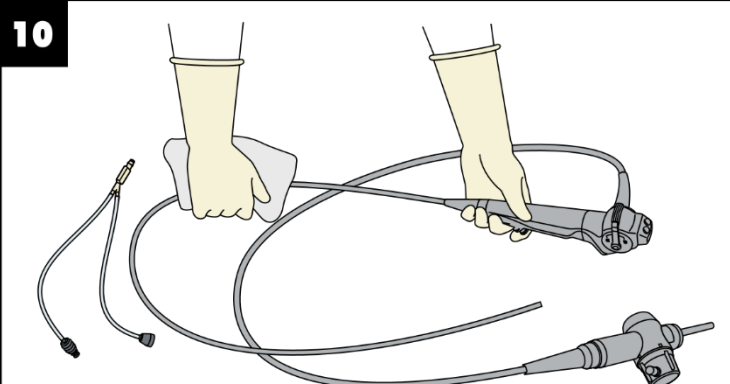


Seque o broncoscópico e o adaptador com um pano estéril e sem fiapos umedecido em álcool. Certifique-se de que o equipamento esteja completamente seco antes do armazenamento.

## TRANSPORTE

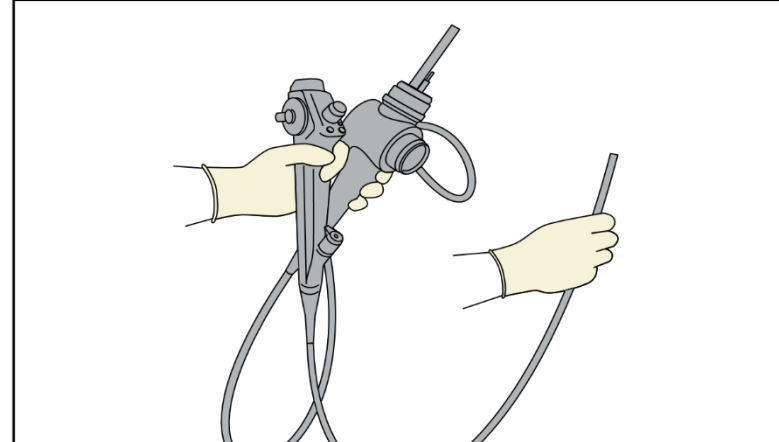

Segure todas as peças do broncoscópico durante o transporte. Não deixe as extremidades do broncoscópico balançar livremente.

## NOMENCLATURA

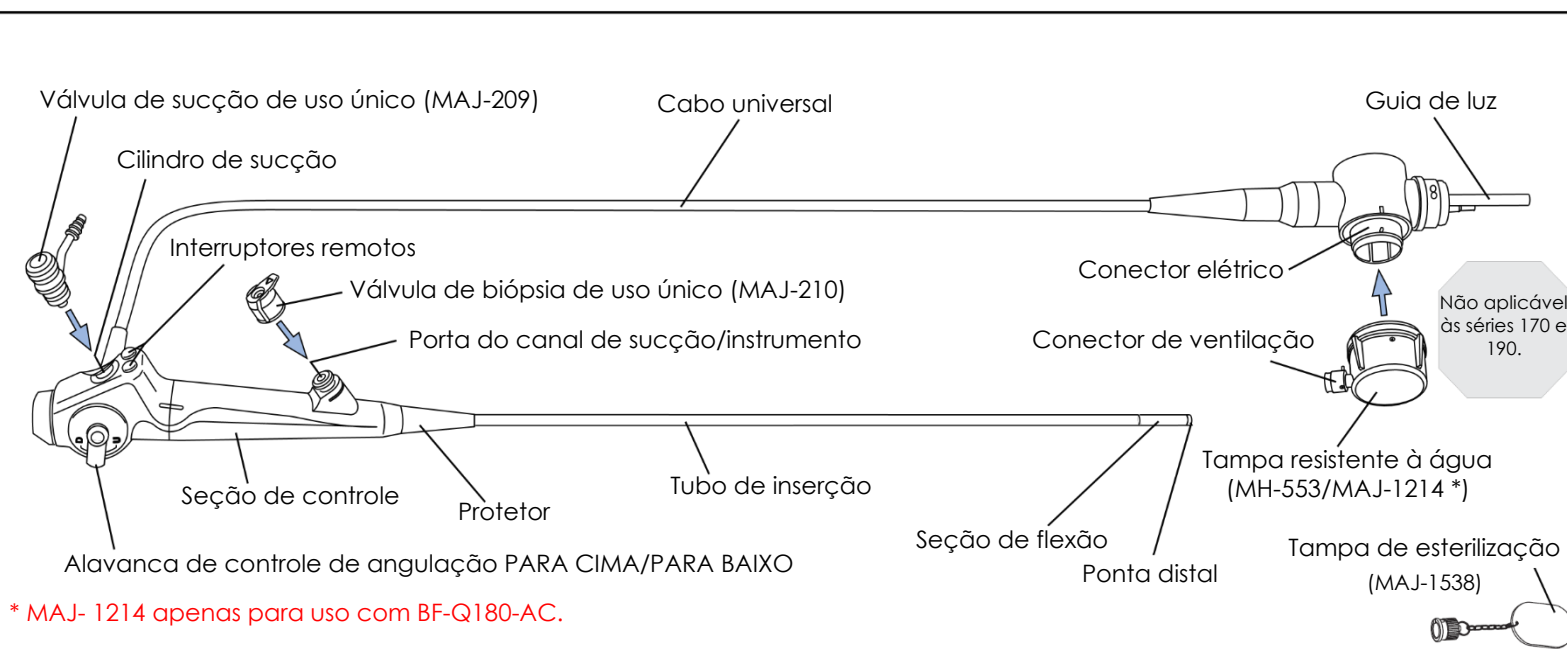

\* MAJ- 1214 apenas para uso com BF-Q180-AC.

## IMPORTANTE

- Use o equipamento de proteção individual adequado.
- Certifique-se de reprocessar todos os acessórios de acordo com o manual de reprocessamento.
- Armazene o broncoscópico pendurado verticalmente com todas as válvulas e tampas removidas.
- Após a desinfecção de alto nível, enxágue o broncoscópico em água estéril ou água processada (por exemplo, filtrada) para melhorar sua qualidade microbiológica.

**Limpe o broncoscópico meticulosamente antes da desinfecção.**

**OLYMPUS**