

GUIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO

Gastrovideoscópios de ultrassom

Consulte o *GUIA DE DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO* complementar para informações de desinfecção

AVISO: Este guia é apenas um resumo das etapas necessárias para limpar corretamente seu endoscópio. Certifique-se de seguir as etapas detalhadas descritas no *MANUAL DE INSTRUÇÕES* incluído na compra do seu endoscópio.

PRÉ-LIMPEZA – Imediatamente após o uso

1

Retire o balão se estiver conectado. Desconecte o balão levantando a faixa traseira do balão após inflar ligeiramente.

2

Limpe o tubo de inserção com um pano embebido em detergente.

3

Aspire o detergente, em seguida, o ar, através dos canais de sucção (estágio ①) e balão (estágio ②).

4

Injete água para lavar o canal do balão (estágio ③).

5

Instale o adaptador de limpeza do canal de ar/água. Injete água e depois deixe injetar ar nos canais de ar e água.

6 *Somente para endoscópios com elevadores:*

Lave o canal do elevador injetando* detergente, água e depois injete ar.

7

Desconecte todos os acessórios.

8

Conecte as tampas e plugues de vedação necessários no conector do endoscópio e conector ultrassônico.

9 **ATENÇÃO:** Se um vazamento for detectado, o endoscópio deve ser reparado. Siga as instruções do fabricante.

Ligue a fonte de ar, conecte o aparelho de teste de vazamento e confirme se a ponta flexível se expande. Realize o teste de vazamento. Mergulhe o endoscópio em água limpa e faça o teste. Angule a ponta durante o teste. Retire da água. Desligue a fonte de ar. Desconecte o aparelho de teste de vazamento do endoscópio depois de desinflar a ponta.

LIMPEZA MANUAL

10

Mergulhe o endoscópio na solução detergente recentemente preparada. Limpe todas as superfícies externas. Limpe a ponta distal do endoscópio (escove e lave* o elevador, se aplicável).

11 *Enquanto imerso:* Escova (BW-20T)

Escove o canal de sucção na região do tubo de inserção. Repita até que todos os resíduos sejam removidos.

12 *Enquanto imerso:*

Escove o canal de sucção na região do tubo universal. Repita até que todos os resíduos sejam removidos.

13 *Enquanto imerso:*

Escove o canal do balão. Repita até que todos os resíduos sejam removidos.

14 *Enquanto imerso:*

Escove o cilindro da válvula de sucção e a entrada do canal de biópsia. Repita até que todos os resíduos sejam removidos.

ENXÁGUE

15

Conecte a válvula de sucção. E a através dos canais de sucção (①) e do balão (②), aspire* o detergente e em seguida o ar.

16

Conecte o tubo de injeção e a tampa dos canais. Injete solução detergente nos canais de aspiração, ar/água e balão.

17 *Somente para endoscópios com elevadores:*

Injete solução detergente no canal do elevador.

18

Limpe a superfície externa do endoscópio e em seguida o mantenha imerso em solução detergente pelo tempo determinado pelo fabricante do detergente.

19

Imerja o endoscópio em água limpa e remova os resíduos superficiais de detergente.

20

Injete água limpa em todos os canais (incluindo o canal do elevador, se aplicável). Depois, retire o endoscópio da água e injete ar em todos os canais para secar.

21

Use um pano macio e que não solte fiapos para remover o excesso de umidade do endoscópio e dos acessórios de limpeza como forma de prepará-los para a desinfecção.

ATENÇÃO

Não bata a extremidade distal do endoscópio contra superfícies duras!

Não se esqueça de colocar tampas e plugues de vedação!

IMPORTANTE

- Use todos os equipamentos de proteção individual adequados.
- A limpeza meticulosa é essencial para uma desinfecção eficaz.
- Certifique-se de reprocessar todas as peças removíveis (por exemplo, válvulas) de acordo com o manual de instruções.
- Inspeccione visualmente o equipamento após a limpeza. Se algum resíduo permanecer, repita o procedimento.