

GUIA PARA DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS


Endoscópios Gastrointestinais EVIS (40/140/240), EXERA (160), EXERA II (180) e EXERA III (190)

Consulte o GUIA PARA A LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS para informações sobre a limpeza

ADVERTÊNCIA: Este guia é somente o resumo da maneira correta de desinfetar o seu endoscópio. Certifique-se de seguir as instruções detalhadas no MANUAL DE REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS, incluído na compra do endoscópio.

DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL

1 Tubo de injeção
Conector de canais

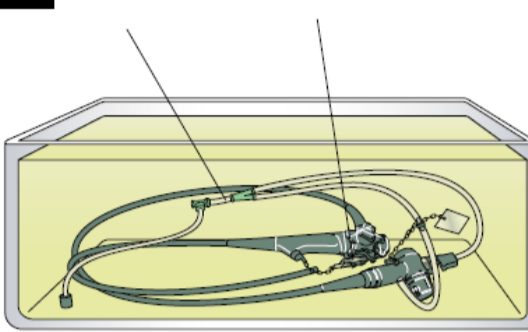


Preencha um recipiente com desinfetante. Encaixe o conector de canais e o tubo de injeção ao endoscópio previamente limpo. Imerja completamente na solução desinfetante.

2



Usando uma seringa, injetar o desinfetante nos canais de ar, água e de sucção.


3 Somente para endoscópios com canal do elevador ou com canal auxiliar de água

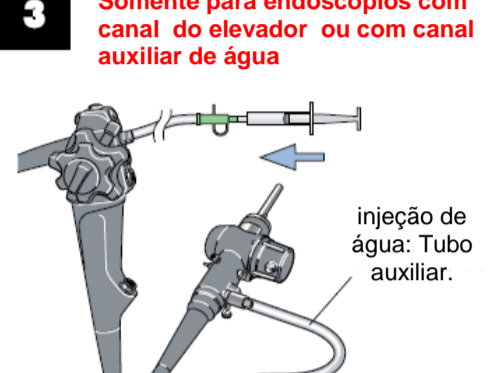

injeção de água: Tubo auxiliar.

Injetar desinfetante através do canal auxiliar de água/canal do elevador.


4

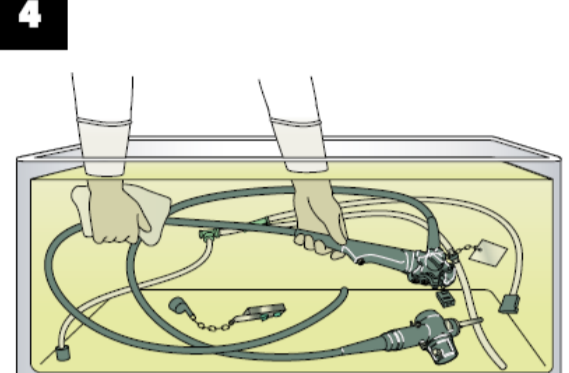

Enquanto o endoscópio estiver submerso, desconecte os acessórios de limpeza e use um pano sem fiapos para remover qualquer bolha aderida às superfícies externas.


ENXÁGUE

5

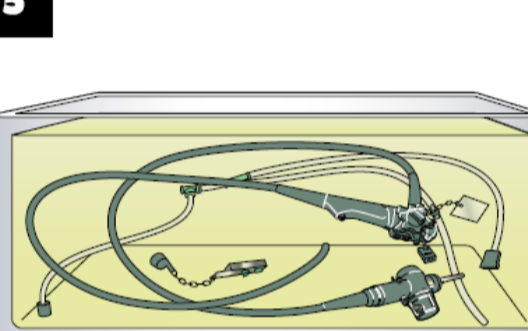

Mergulhe o equipamento todo, conforme o tempo e temperatura de desinfecção recomendado pelo fabricante. Use um cronômetro para medir o tempo exato de contato.

6

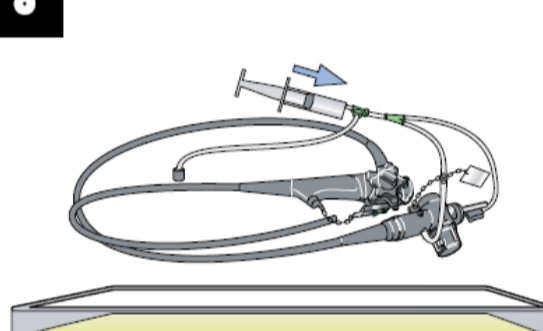


Encaixe o conector de canais e o tubo de injeção. Injetar ar para remover o desinfetante dos canais de ar, água e sucção. Tire o endoscópio do desinfetante.

7 Somente para endoscópios com canal do elevador ou com canal auxiliar de água:



Injetar ar através do canal auxiliar de água/canal do elevador para remover o desinfetante


8 **ADVERTÊNCIA:** Siga as instruções de enxágue do fabricante do desinfetante.

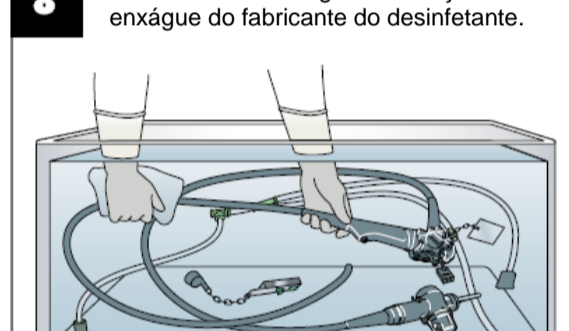

Desconecte o conector de canais e o tubo de injeção. Imerja o endoscópio e os acessórios removíveis na água. Enxágue cuidadosamente todas as superfícies.


SECAGEM

9

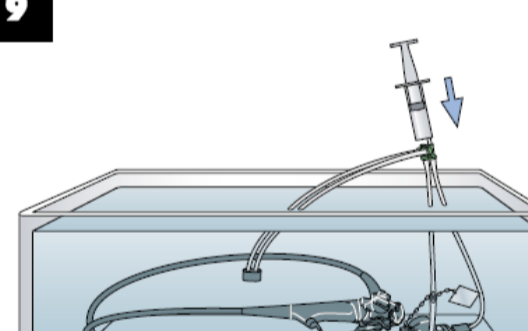

Encaixe o conector de canais e o tubo de injeção. Use uma seringa para injetar água através dos canais de ar, água e sucção.

10 Somente para endoscópios com canal do elevador ou com canal auxiliar de água:

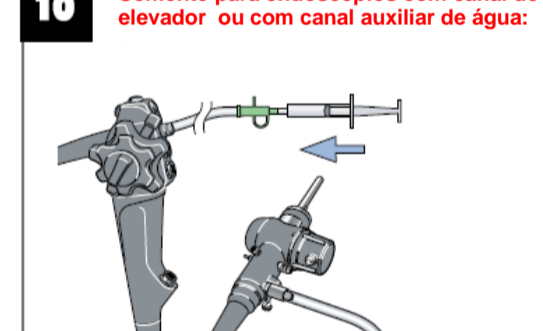


Injete água através do canal auxiliar de água/canal do elevador.

11



Remover o endoscópio da água de enxágue. Usar a seringa para injetar ar nos canais de ar, água e sucção, para remover a água do enxágue.

12 Somente para endoscópios com canal do elevador ou com canal auxiliar de água:

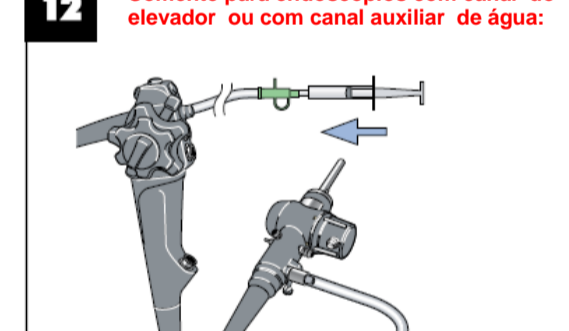

Injete ar através do canal auxiliar de água/canal do elevador.

13



Álcool


Usando a seringa, injete álcool 70% através dos canais de ar, água e sucção. Injete ar para remover o álcool.

14 Somente para endoscópios com canal do elevador ou com canal auxiliar de água:



Injete álcool 70% através do canal auxiliar de água/canal do elevador. Injetar ar para remover o álcool.

15

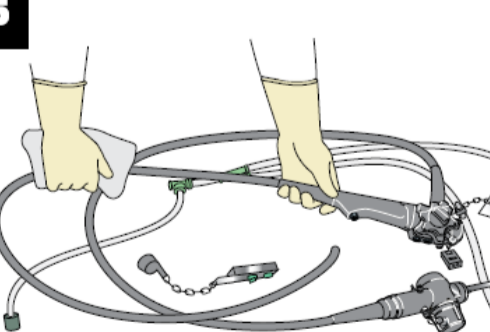

Desconecte todos os acessórios do endoscópio. Seque o endoscópio e seus acessórios, com pano umedecido em álcool. Certifique-se que o equipamento esteja completamente seco antes de armazená-lo.

IMPORTANTE

- Utilize equipamento de proteção individual apropriado.
- Use desinfetante compatível e verifique a concentração mínima efetiva de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se de reprocessar todas as partes removíveis (Ex. válvulas) conforme o manual de reprocessamento.
- Depois da desinfecção de alto nível, enxaguar o endoscópio em água estéril ou água que tenha sido processada (por exemplo, filtrada) para melhorar sua qualidade microbiológica.

Limpe cuidadosamente o endoscópio antes da desinfecção