


## FLUXO DE TRABALHO DE DESINFECÇÃO DO ENDOSCÓPIO para EVIS EXERA II Duodenovideoscópico TJF-Q180V




**AVISO:** Este trabalho é **um resumo** das etapas necessárias para reprocessar corretamente seu TJF-Q180V. Siga as etapas detalhadas instruídas no **MANUAL DE REPROCESSAMENTO DO ENDOSCÓPIO** mais recente para o TJF-Q180V.

### Desinfecção Manual de Alto Nível

**1** Mergulhe o endoscópio na solução desinfetante

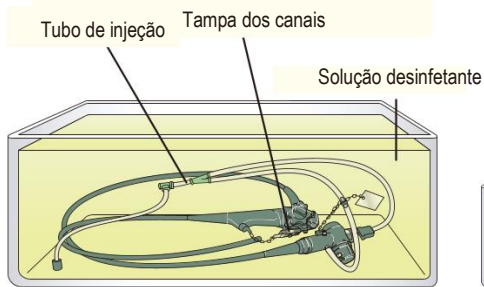

**2** Injete solução em todos os canais (180ml)

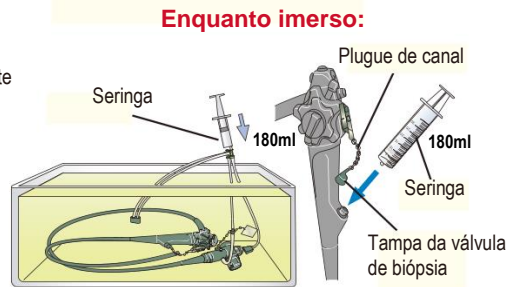

**Enquanto imerso:**

**3** Com o elevador levantado, lave o recuo do elevador com solução desinfetante (60ml)



**Enquanto imerso:**


**4** Com o elevador abaixado, lave o recuo do elevador com solução desinfetante (60ml)



**Enquanto imerso:**

### Desinfecção Manual de Alto Nível


**5** Injete solução no canal do instrumento (90ml)

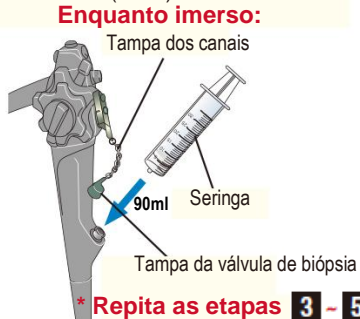

**Enquanto imerso:**


\* Repita as etapas **3 - 5**

**6** Com o endoscópio imerso na solução detergente, desconecte os acessórios e remova as bolhas da sua superfície

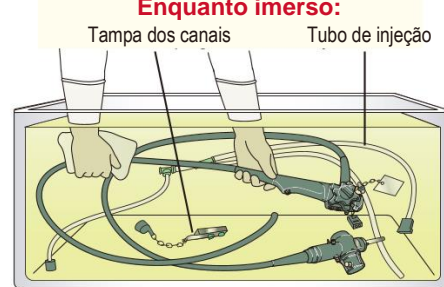


**Enquanto imerso:**

**7** Deixe o endoscópio e os acessórios sob ação do desinfetante

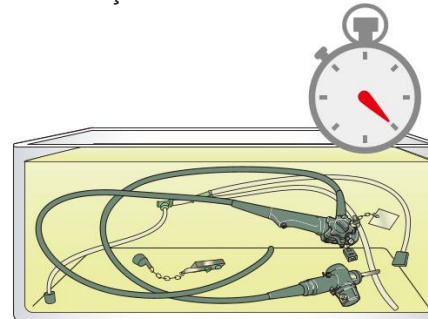


**8** Reconecte os acessórios e injete ar nos canais de sucção e ar/água (90ml)

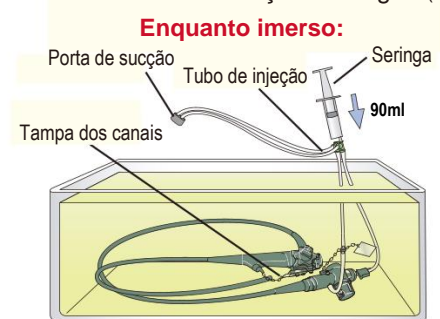


**Enquanto imerso:**

### Desinfecção Manual de Alto Nível Enxágue

**9** Remova o endoscópio da solução desinfetante

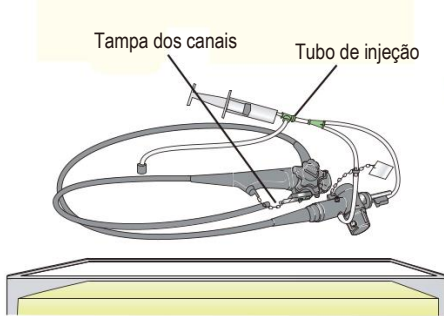


**10** Lave as superfícies externas

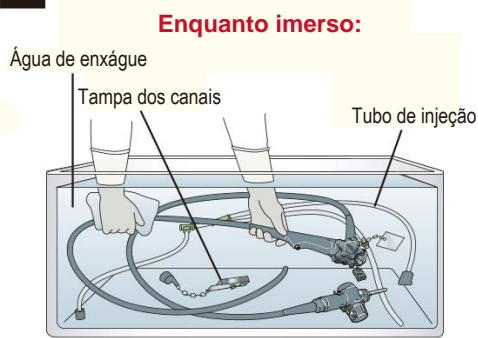

**Enquanto imerso:**

**11** Enxágue os canais (90ml)

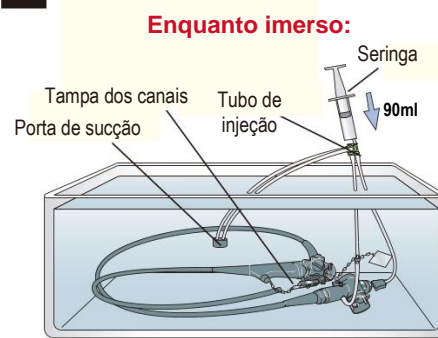

**Enquanto imerso:**

**12** Com o elevador levantado, lave o recuo do elevador com água (30ml)



**Enquanto imerso:**


### Enxágue

**13** Com o elevador abaixado, lave o recuo do elevador com água (30ml)




**Enquanto imerso:**

**14** Injete ar nos canais (90ml)

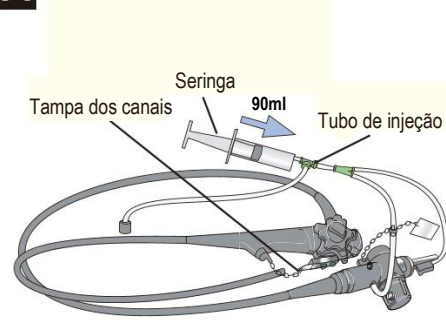


**15** Com uma bomba de sucção, aspire ar (15s), em seguida, seque as superfícies externas

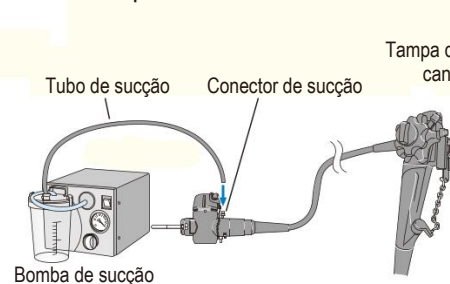

### Secagem


**16** Injete álcool nos canais de sucção (90ml) e ar/água (30ml)

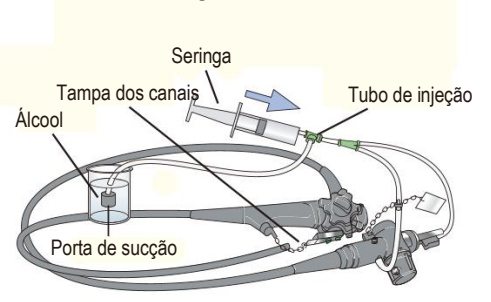


\*Se necessário repita as etapas **10 ~ 13**

### Secagem


**17** Com o elevador levantado, lave o recuo do elevador com álcool (30ml)

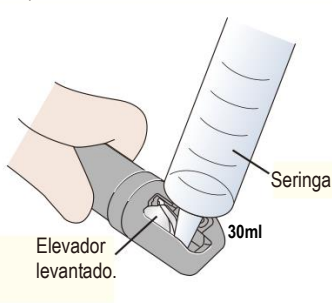

**18** Com o elevador abaixado, lave o recuo do elevador com álcool (30ml)

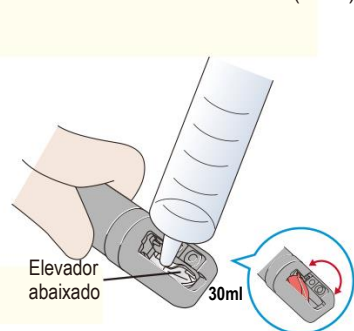

**19** Injete ar nos canais (90ml)

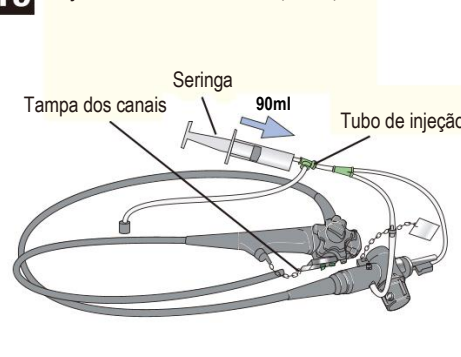

**20** Seque as superfícies externas

